

¿Qué es BoviLab?

BoviLab es un dispositivo avanzado de análisis de sangre que ofrece a ganaderos y veterinarios información inmediata sobre el período de transición de las vacas. BoviLab mide los parámetros sanguíneos esenciales en pocos minutos, directamente en la granja.



Tamaño reducido y portátil. Prevenir, curar y monitorizar la cuadra con BOVILAB



Resultados en menos de 7 minutos, directamente en la granja.



Visibilidad inmediata del período de transición



Bajo coste por test



Dispositivos fáciles de usar



Adecuado para la atención curativa y preventiva, así como para el seguimiento del período de transición.




Paso 1: Toma una muestra de sangre de la vaca



Toma una muestra de sangre de la vaca, fácilmente accesible a través de la vena de la cola.

Paso 2: Coloca unas gotas de sangre en la slide de prueba

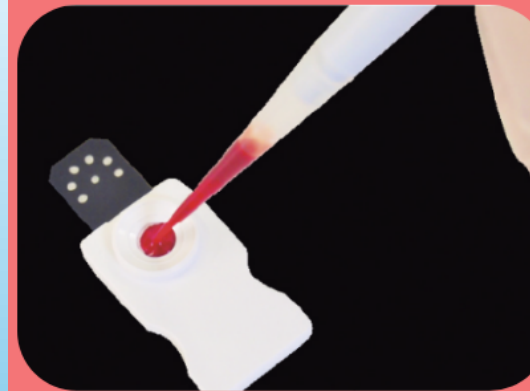

Con una pipeta mecánica coloca unas gotas de sangre sobre la slide de prueba.

Paso 3: Inicia el análisis con solo pulsar un botón



Introduce la slide en el dispositivo Bovilab y pulsa el botón de inicio. El análisis se realiza de forma completamente automática.

Paso 4: Consulta los resultados en pocos minutos



En menos de 7 minutos los resultados aparecen en la pantalla, ofreciéndote información inmediata sobre la salud de la vaca. Los resultados también se sincronizan automáticamente con nuestro panel online.

PARAMETROS DE LOS DIFERENTES KITS:

VACAS EN TRANSICIÓN:

- NEFA:
- BHB
- BUN
- Calcio
- Magnesio
- Fósforo

VACAS CAIDAS:

- Calcio
- Magnesio
- Fósforo
- CK
- AST
- NEFA

FUNCIÓN HEPATICA:

- AST
- GGT
- Proteína total
- Albúmina
- Colesterol
- Glucosa
- Globulina (calculada)
- Relación A/G (calculada)

BALANCE NUTRITIVO





- Albumina
- Bilirrubina
- Colesterol
- Proteína total
- BUN, NEFA
- Globulina (calc.)
- Relación A/G (cálculo)
- NEFA/Índice de colesterol (calc.)
- Índice de salud hepática (calc.)

BALANCE NUTRITIVO TERNEROS:

Desarrollo del rumen.

- GGT
- Proteína total
- Albúmina
- BUN
- Colesterol
- BHB:

Visualización de resultados

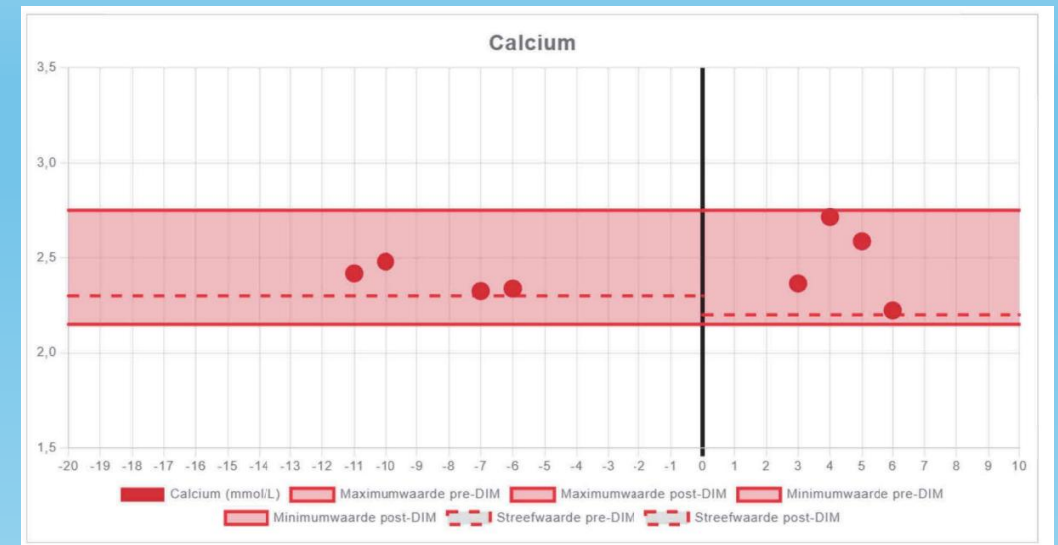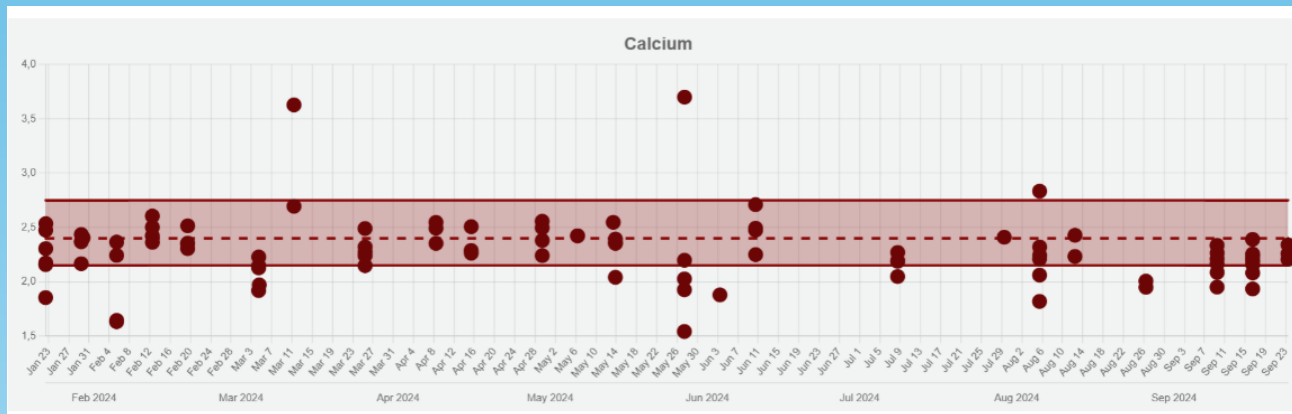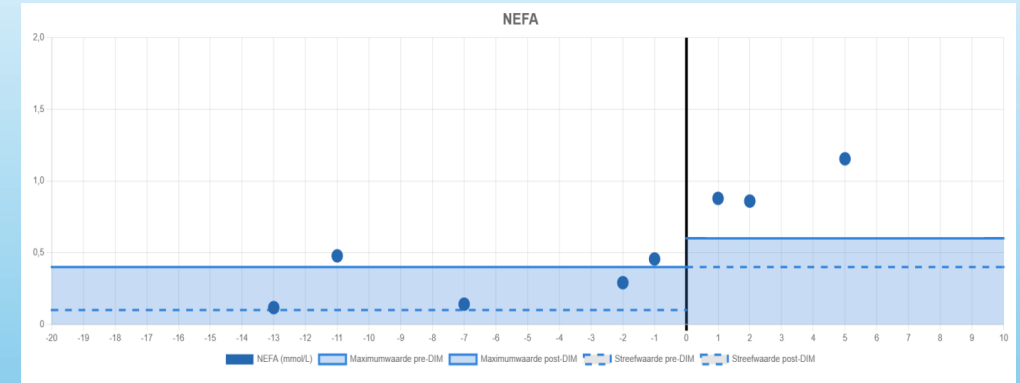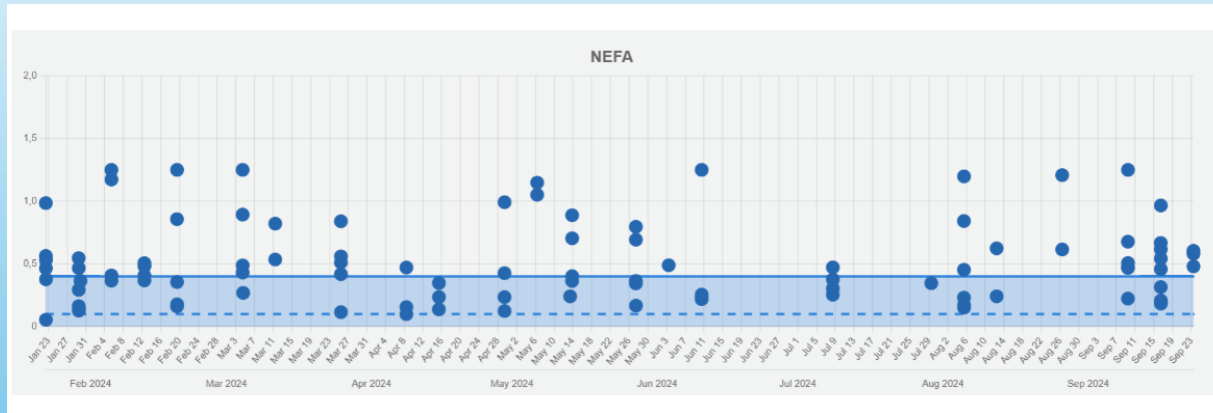

POR QUE ANALISIS DE SANGRE?

- **Diagnostico de animales enfermos.** Vacas caídas.



- **Detección de enfermedades subclínicas.**

- **Prevención/monitoreo**

Identificación temprana de deficiencias en animales de riesgo.



DISEÑADO PARA VETERINARIOS

- Experiencia Vs Interpretación.
- Incidir en el periodo de transición.
- Asesoramiento de tratar a prevenir.



POR QUE BOVILAB?

- Portátil , resultados inmediatos en granja.



- Único en medición de NEFA. Esencial en transición.



Visualización de resultados.

Tablas
Gráficas



AREAS DE ASESORAMIENTO

- **Transición:** B.energético, prot, Ca.
- **Función hepática:** Clave en la transición.
- Desarrollo del ternero.

